

# 사용설명서

## 1. 사용 목적

탐촉자, 디텍터 등 신호를 전달 · 측정하는 체외형  
범용 프로브

## 2. 사용 방법

### 가. 사용 전 준비사항

- 1) 사용 전 본 제품의 포장 및 외관 상태를 확인한다.
- 2) 환자감시장치 및 산소포화도측정기기 같은 의료 장비와 호환이 가능한지 확인한다.
- 3) 사용 점 사용방법 및 사용 시 주의사항 등을 확인한다.
- 4) 제품의 규격 및 유효기간을 확인한다.

### 나. 사용 방법

- 1) Disposable Skin Temperature Probe
  - 본 기기의 커넥터를 환자감시장치에 연결한다.
  - 환자의 부착 위치까지 케이블의 길이를 확인한다.
  - 점착면의 보호 커버를 제거한 후, 환자의 부착하고자 하는 위치에 센서가 피부에 닿도록 붙인다.
  - 환자감시장치 화면에 표시되는 체온 값을 모니터링한다.
- 2) Disposable SpO2 Sensor
  - 환자에게 부착하고자 하는 위치를 확인한다.
  - 커넥터를 산소포화도측정기기 등의 케이블 연결구에 연결한다.
  - 측정기기에서 측정된 값이 일정하게 표시되는지 확인한 후 측정값을 모니터링 한다.

### 다. 사용 후 관리방법

- 1) 사용 후에는 연결된 기기로부터 탈착한다.
- 2) 본 제품은 일회용이므로 사용 후 폐기한다.

## 3. 사용 시 주의사항

### 가. 사용 시 주의사항

- 1) 사용 전 제품 및 포장에 이상이 있을 경우 사용해서는 안된다.
- 2) 피부에 이상이 발생하는 경우 사용을 중단해야 한다.
- 3) 의료전문가에 의해서 반드시 사용되어야 한다.
- 4) 사용목적 외의 용도로 사용해서는 안 된다.
- 5) 본 제품은 일회용 멸균 의료기기이므로 재사용 해서는 안된다.

### 나. 사용기간

제조일로부터 2년

## 4. 멸균제품

멸균방법: 산화에틸렌(E.O)가스 멸균

## 5. 저장방법

실온의 건조한 곳에서 보관

## 6. 제조원

(주)솔메딕스

서울특별시 마포구 성암로 330, 7층 702, 703, 706호

(상암동, 디엠씨첨단산업센터)

T) 02-717-7852

제조업 허가번호: 제5675 호

**본 제품은 일회용 의료기기로  
재사용을 금지함**

부작용 보고 관련 문의처

(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)